


ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИКОРИСТОВУЄ ОДНОКОМПОНЕНТНІ КАЛОПРИЙМАЧІ

Як наклеїти калоприймач

1

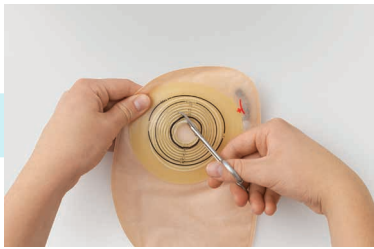

Визначити розмір стоми за допомогою трафарету. Накласти трафарет на клейову пластину калоприймача і нанести контури на захисне покриття пластини. За цими контурами вирізати у пластині отвір на 1–2 мм більший за розмір стоми.

2



Якщо калоприймач з відкритим мішком слід закрити його (на липучку чи на паличку).

3



Очистити стоми та шкіру навколо стоми, за необхідності нанести додаткові засоби догляду за стомою.

6



Під час наклеювання слід поступово розгладжувати пластину від центру до країв пластини, щоб не утворювалися складки.

5



Щоб приклеїти пластину слід зіставити нижній край вирізаного отвору з нижньою межею стоми. Починати клеїти пластину калоприймача необхідно знизу вгору, щільно притискаючи її до шкіри.

4



Зігріти клейову пластину між долонями або під пахвою і зняти захисну плівку.

Дренаж (спорожнення) калоприймачів

Закриті мішки слід замінювати щоразу при заповненні на 1/3 об'єму каловими масами.

Відкриті мішки при наповненні їх на 1/3 необхідно спорожнити. Не слід допускати переповнення мішка.

Однокомпонентні калоприймачі слід дреноувати не відклеюючи від шкіри.

1

Аби спорожнити однокомпонентний калоприймач, направте мішок дренажним кінцем в унітаз, відкрийте дренажний отвір і спорожніть мішок.



2

Після цього ретельно витріть дренажний кінець та закрийте його на застібку.



Як зняти пластину



Однією рукою потрібно взяти мішок за спеціальний виступ і обережно відклеїти його зверху вниз, іншою рукою притримувати шкіру.

Увага!

Щоб уникнути механічного пошкодження шкіри не слід відклеювати мішок ривком або робити різкі рухи. Пам'ятайте, що калоприймач наклеюється на шкіру тільки один раз, його повторне використання не допускається.



Coloplast
www.coloplast.ua



ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА «КОЛОПЛАСТ А/С» В УКРАЇНІ
+38 (050) 437-30-30 • +38 (067) 516-30-30