

ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИКОРИСТОВУЄ ДВОКОМПОНЕНТНІ КАЛОПРИЙМАЧІ

Як наклеїти пластину

1



Визначити розмір стоми за допомогою трафарету. Накласти трафарет на клейову пластину калоприймача і нанести контури на захисне покриття пластини. За цими контурами вирізати у пластині отвір на 1-2 мм більший за розмір стоми.

2



Якщо калоприймач з відкритим мішком слід закрити його (на липучку чи на паличку).

3




Очистити стому та шкіру навколо стоми, за необхідності нанести додаткові засоби догляду за стомою.

6



Під час наклеювання слід поступово розгладжувати пластину від центру до країв пластини, щоб не утворювалися складки.

5

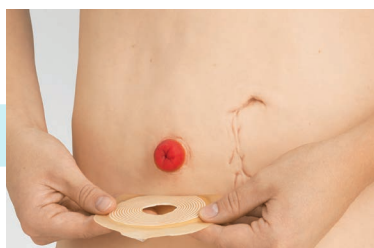

Щоб приклеїти пластину слід зіставити нижній край вирізаного отвору з нижньою межею стоми. Починати клеїти пластину калоприймача необхідно знизу вгору, щільно притискаючи її до шкіри.


4



Зігріти клейову пластину між долонями або під пахвою і зняти захисну плівку.

Як надіти мішок на пластину

1

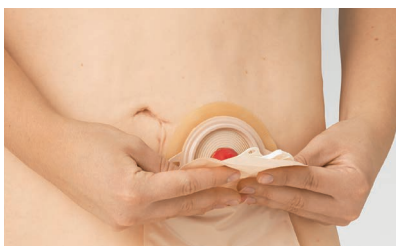

Закріплювальне кільце мішка повинно бути відкрите. Одягніть мішок на фланцеве кільце пластини знизу вгору.

2



Необхідно перевірити, що мішок надійно встановлений на пластині та повернути мішок в зручне положення.


3



Після цього необхідно стиснути защібку. Звук клацання свідчить про те, що мішок надійно закріплений на пластині. Для того, щоб перевірити фіксацію мішка на пластині потрібно посмикати мішок з боку в бік.

Як зняти мішок з пластини

Щоб зняти мішок, необхідно натиснути на защібку, відкрити закріплювальне кільце та обережно потягнути за вушко мішок вгору і від себе, при цьому однією рукою притримувати пластину.

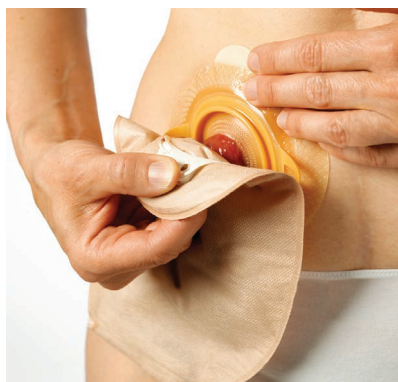

Як зняти пластину

Спочатку необхідно зняти з пластини мішок. Після однією рукою візьміть пластину за спеціальний виступ і обережно відклеюйте її зверху вниз, іншою рукою притримуйте шкіру. Не можна відклеювати пластину ривком. Пам'ятайте, що пластину наклеюється на шкіру тільки один раз, її повторне використання не допускається.



Coloplast
www.coloplast.ua



ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА «КОЛОПЛАСТ А/С» В УКРАЇНІ
+38 (050) 437-30-30 • +38 (067) 516-30-30